

**ФОТОРОЛЛЕР** – ручной аппарат, сочетающий в себе возможности косметической мезотерапии и фотонотерапии.

Процедура включает терапию микро-иглами, длина которых выбирается по типу и состоянию кожи, и терапию светом (Синий фотон длиной до 405 нм - используется для лечения воспалительных реакций кожи при акне, обладает бактерицидным и себорегулирующим эффектом, уменьшает тенденцию к пигментации. Красный свет длиной до 633 нм - стимулирует выработку волокон кожи и способствует омоложению). В результате начинается быстрый процесс восстановления, приводящий к омолаживанию, укреплению и разглаживанию кожи. Процедура одинаково эффективна как при рубцах и постакне, так и при вялости и дряблости зрелой возрастной кожи.



**Концепция:** метод эффективен с первой же процедуры, способствуя повышению упругости, лифтингу и омоложению кожи. С помощью серии процедур можно:

- ☁️ уменьшить глубину морщин,
- ☁️ разгладить шрамы и рубцы,
- ☁️ уменьшить выраженность стрий.

**Способ применения:** тщательно очистить и продезинфицировать кожу, нанести активный серум (**Гекса Дропс** и/или Гиалуроновый **филлер "Коллаген+"** - при мимических морщинах, **Деко Дропс** и/или Гиалуроновый **филлер "Витамин+"** - при дряблой коже, **Жемчужный серум** или Гиалуроновый филлер **"Арбутин+"** - для кожи с гиперпигментацией), выбрать подходящую длину иглы (0,2 мм для ухода за кожей вокруг глаз, 0,5 мм для тонкой кожи с куперозом, 1 мм для плотной кожи). Перемещайте фотороллер по всей поверхности кожи, в направлениях вдоль и поперёк. По окончании продезинфицировать кожу и провести успокаивающий и восстанавливающий уход, с помощью соответствующих кремов и масок.

**Внимание!** Насадка с иглами не может передаваться от клиента к клиенту, насадка является многоразовой только при ее стерилизации и индивидуальном использовании! Настоятельно рекомендуется пройти обучающий курс перед покупкой прибора.

